



ODM 5[®]

SEE LIFE CLEARLY

Das 1. konservierungsmittelfreie
Ödemprodukt in der Flasche

5%
Natrium-
chlorid

▶ Effizienz

+

0,15%
Hyaluron-
säure

▶ Komfort

+

0%
Konservierungs-
mittel

▶ Verträglichkeit



100%

Compliance



TRB

Your experience
Your expertise
Your expectations

Hyperosmolare Augentropfen ohne Konservierungsmittel

Darreichungsform:

10 ml-Multidosis-Fläschchen ohne Konservierungsmittel.

Zusammensetzung:

5% Natriumchlorid, 0,15% Hyaluronsäure. Weitere Inhaltsstoffe: Gereinigtes Wasser, tri-Natriumcitrat-Dihydrat, Zitronensäuremonohydrat, Hydroxypropylmethylcellulose.

ODM 5[®] enthält Hyaluronsäure, einen natürlichen Bestandteil des Auges, welcher durch seine Eigenschaft als Schmiermittel zum Schutz der Hornhaut beiträgt.

Wozu verwendet man ODM 5[®]?

ODM 5[®] wird empfohlen, um Hornhautödeme zu reduzieren: Ödeme, die durch Hornhautdystrophien, posttraumatische Ödeme oder postoperative Ödeme entstanden sind.

Hornhautödeme zeichnen sich durch einen Überschuss an Flüssigkeit in der Hornhaut aus. Die hypersaline Lösung ODM 5[®] zieht durch eine osmotische Wirkung diese überschüssige Flüssigkeit aus der Hornhaut heraus, sodass diese temporär wieder normal hydriert ist. ODM 5[®] trägt somit zu einer Verbesserung Ihrer Sehqualität bei.

Wie wird ODM 5[®] verwendet?

- Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie mit der Anwendung beginnen.
- Tropfen Sie je nach Empfehlung Ihres Arztes 4 Mal pro Tag 1 bis 2 Tropfen in den unteren Bindehautsack, indem Sie nach oben schauen und das untere Lid leicht nach unten ziehen.
- Lassen Sie das Auge danach 1 bis 2 Minuten geschlossen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschenspitze mit dem Auge oder den Lidern.
- Muss nach der Anwendung nicht ausgespült werden.
- Zur Anwendung am Auge.



1. Beim ersten Gebrauch prüfen, ob der Schutzring intakt ist, diesen danach entfernen.
2. Die Schutzkappe entfernen, indem Sie sie nach oben ziehen.
3. Fläschchen umgedreht über das Auge halten. Behältnis in der Mitte mit Zeigefinger und Daumen festhalten.
4. Druckkraft mit beiden Fingern gleichmäßig erhöhen, bis sich ein Tropfen an der Spitze bildet und bei Erreichen einer bestimmten Größe abfällt. 1 bis 2 Tropfen ins Auge tropfen.
5. Setzen Sie die Schutzkappe nach jeder Verwendung wieder auf das Fläschchen und achten Sie darauf, dass die Tropferspitze trocken ist. Schütteln Sie eventuell verbleibende Resttropfen durch eine rasche Handbewegung ab.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen:

- Nicht einnehmen.
- Nicht verwenden, wenn das Fläschchen beschädigt ist (Kontaminationsgefahr).
- Nicht nach dem auf dem Fläschchen angegebenen Verfallsdatum verwenden.

- Innerhalb von 3 Monaten nach dem Öffnen zu verwenden (Kontaminationsgefahr und Verlust der Wirksamkeit des Produkts).
- Bei Raumtemperatur aufbewahren (zwischen +2 und +25 °C).
- Verschließen Sie das Fläschchen nach jeder Anwendung sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass die Tropferspitze trocken ist (Kontaminationsgefahr).
- Achten Sie darauf, dass die Tropferspitze des Fläschchens nicht mit den Händen, dem Auge oder den Lidern in Berührung kommt (Risiko einer bakteriellen Kontamination).
- Tropferspitze nicht mit den Fingern oder einem unsterilen Tuch berühren oder abtrocknen (Risiko einer bakteriellen Kontamination).
- Falls Ihr Augenarzt Ihnen andere Augentropfen verschrieben hat, muss zwischen der Anwendung der beiden Produkte ein Mindestintervall von 15 Minuten eingehalten werden.
- Außerhalb der Reich- und Sichtweite von Kleinkindern aufbewahren.

Gegenanzeigen:

- Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.
- Kontaktlinsenträger (ODM 5[®] ist nicht mit Kontaktlinsen kompatibel)

Nebenwirkungen:

- In manchen Fällen können beim Einträufeln vorübergehende Beeinträchtigungen wie ein leichtes Brennen oder Prickeln auftreten, ebenso wie eine temporär verschleierte Sicht.
- Bei dauerhaften Nebenwirkungen sowie Nebenwirkungen, die in dieser Packungsbeilage nicht beschrieben sind, brechen Sie die Verwendung des Produkts ab und fragen Sie Ihren Arzt.

Dieses Medizinprodukt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG in ihrer abgeänderten Form.

Datum der Kennzeichnung: Oktober 2013.

Datum der letzten Überarbeitung des Textes: November 2018. Patent angemeldet.

EAN: 3401520128170

Unverbindliche Preisempfehlung:
15,42 € (inkl. MwSt.)



TRB

Your experience
Your expertise
Your expectations

Vertrieb:

TRB CHEMEDICA AG

Otto-Lilienthal-Ring 26 / 85622 Feldkirchen b. München

Tel +49 (0)89 46 14 83-0 / Fax +49 (0)89 46 14 83-85

info@trbchemica.de / www.trbchemica.de



HORUS PHARMA, 148 Avenue G. Guynemer
06700 Saint-Laurent du Var, Frankreich